

# OTRIMER nässpray

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE  
SE

## Otrimer nässpray

### Isotonisk havssaltlösning, med renande och fuktande egenskaper.

Läs noga igenom denna bipacksedel före användning av Otrimer. Om du har några frågor, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

#### 1. Vad Otrimer är och vad det används för

Otrimer är en isotonisk havssaltlösning utan konserveringsmedel.

Otrimer rekommenderas för att:

- rena täppt näsa skonsamt vid förkylningar och allergiska symtom. Otrimer sköljer bort överflödigt slem eller allergena partiklar, såsom damm eller pollen.
- fukta näsans torra eller irriterade slemhinnor vid lindrig irritation av slemhinnor eller till följd av låg luftfuktighet (t. ex. på grund av vistelse i uppvärmda eller luftkonditionerade rum, vistelse på hög höjd eller under flygresor).
- förtunna och lösa upp sekret som sedan lätt kan snytas ut.

#### 2. Innan du använder Otrimer

Använd inte Otrimer, om du är allergisk (överkänslig) mot något av innehållsämnen.

Använd inte sprayflaskan om den har gått sönder eller är skadad.

Inga särskilda försiktighetsåtgärder är nödvändiga om produkten används enligt anvisningarna. Rådfråga läkare om du nyligen har genomgått en näsoperation eller har haft en skada i näsan, innan du använder Otrimer.

Till följd av dess rengörande egenskaper, rekommenderas att Otrimer används före någon annan produkt som verkar lokalt i näsan (t.ex. vid förkylning eller allergisk snuva).

Otrimer kan användas under graviditet och amning.

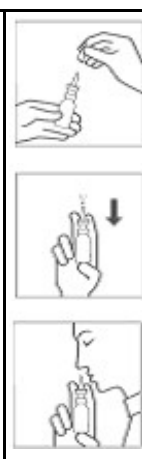
#### 3. Hur du använder Otrimer

Otrimer passar för spädbarn (över 3 månader), barn och vuxna.

##### En spraydusch i vardera näsborren vid behov.

Vanligtvis används Otrimer 2–4 gånger dagligen. Vid behov kan produkten användas så ofta som det behövs.

Av hygieniska skäl bör sprayflaskan bara användas av en person.

<p>1. Snyt näsan om det behövs.</p> <p>2. Ta av skyddskorken från sprayflaskan (bild 1.). Håll tummen mot flaskans botten och sätt spetsen mellan pekfingret och långfingret. Vid första användningen, håll flaskan med spetsen uppåt och pumpa några gånger tills Otrimer kommer ut som en jämn dusch (bild 2.). Därefter är nässprayen färdig för användning.</p> <p>3. För flaskans spets försiktigt in i näsborren. Spraya en gång samtidigt som du andas in genom näsan (bild 3.). Gör likadant i den andra näsborren.</p> <p>4. Rengör spetsen och håll det torr efter användning. Sätt på skyddskorken.</p>	
--	---

#### 4. För din säkerhet

Vid normal användning enligt bruksanvisningen tolereras produkten väl. Om du har frågor om användningen av denna produkt, kontakta läkare eller apotekspersonal.

#### 5. Hur Otrimer ska förvaras

##### Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte efter utgångsdatumet angivet på förpackningen. Öppnad förpackning är hållbar i 3 månader. Skyddas mot hetta. Förvaras i originalförpackningen.

#### 6. Övriga upplysningar

Innehållsdeklaration: naturlig havssalt, renat vatten. Utan konserveringsmedel.

Otrimer finns i 20 ml sprayflaska.

**Tillverkare:**

Novartis Consumer Health S.A.,  
Route de l'Etraz, 1260 Nyon 1, Schweiz

**Den nationella representanten för tillverkaren:**

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Finland Oy, Biskopsbron 9 A, PB 24, 02231 Esbo, tel. 080 077 40 80, s-posti: scanda.consumer-relations@gsk.com

**Bipacksedeln reviderad:**

16.12.2015

**Tekstin muuttamispäivämäärä**

16.12.2015

**Tiedot Vnr-tietokannasta****Markkinoilla olevat pakkaukset***Itsehoito*OTRIMER nenäsumute

20 ml (-)

**Korvattavuus**OTRIMER nenäsumute

20 ml

- Ei korvausta.