



Easyhaler®

bruksanvisning

Läkaren har ordinerat

Inflammationsförebyggande läkemedel

○ Budesonid Easyhaler®

○ Beclomet® Easyhaler®

Luftrörsvidgande läkemedel

○ Buventol® Easyhaler®

○ Formoterol Easyhaler®

Kombinationsläkemedel

○ Bufomix® Easyhaler®

ORION
PHARMA

Så här tar du Easyhaler-inhalatorn i användning

Det är lätt att ta läkemedel med Easyhaler-inhalatorn. Lär dig använda inhalatorn ordentligt.

- Ta fram inhalatorn ur laminatpåsen.
- Öppna skyddskåpan och sätt in inhalatorn. Skyddshuven för munstycket hindrar inhalatorn från att laddas.
- Stäng skyddskåpan om du inte ska ta läkemedlet genast.



Så här tar du läkemedlet

- 1 Öppna skyddskåpan och avlägsna skyddshuven från munstycket.
- 2 Skaka inhalatorn i upprätt läge 3-5 gånger.
- 3 Ladda dosen genom att hålla inhalatorn mellan pekfingret och tummen och tryck en gång tills du hör ett klick. Låt inhalatorn återgå till sitt ursprungliga läge. Dosen är nu klar för inandning.
- 4 Andas ut normalt och placera munstycket mellan tänderna. Slut läpparna tätt runt munstycket. Ta ett kraftigt och djupt andetag genom inhalatorn. Ta inhalatorn från munnen och andas ut normalt bort från inhalatorn.



Upprepa steg 2-4 om du har ordinerats mer än en dos.



Obs. Inhalatorn används för inandning av en dos åt gången. Om du av misstag har laddat mer än en dos, töm ut pulvret genom att knacka munstycket mot bordet eller handflatan. Börja därefter om med steg 2.

Andas aldrig ut i inhalatorn, eftersom fukten i utandningsluften kan skada apparaten.

- 5 Förvara inhalatorn i skyddskåpan.
- 6 Skölj munnen och gurgla svalget med vatten. Spotta ut vattnet.

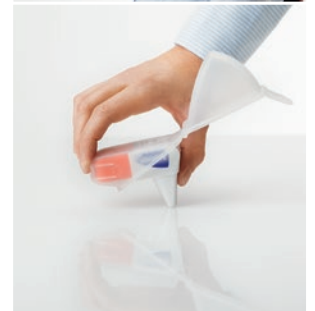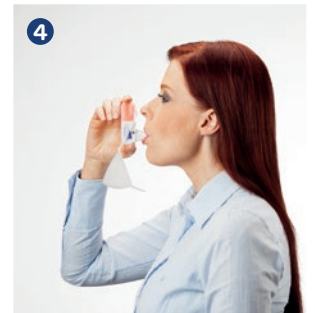

Om du använder både luftrörsvidgande och inflammationsförebyggande inhalationsläkemedel, ska du ta det luftrörsvidgande läkemedlet först.



Rengöring och förvaring

Inhalatorn förvaras bäst i skyddskåpan. Rengör munstycket minst en gång i veckan med mjukt, torrt papper, använd inte vatten. Förvara inhalatorn i rumstemperatur i skydd mot fukt.



Spara skyddskåpan för din nästa Easyhaler-inhalator.

Byt ut din Easyhaler mot en ny när dosräknaren visar 0

Easyhaler-inhalatorn innehåller 60, 100, 120 eller 200 doser. Dosräknaren i sidan på inhalatorn visar hur många doser som finns kvar. Siffran ändras med intervall på 10 doser. Färgen blir röd när det finns 20 doser kvar. När inhalatorn är tom, återstår ännu en liten mängd pulver som inte ska användas. Det är alltså dags att byta ut din Easyhaler mot en ny när dosräknaren visar 0.

När inhalatorn är slutanvänd, kan du returnera den till apoteket för kassering.